

遠赤外線でじんわりポカポカ

ウォームストーン  
パック

HEATRAY



## 持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック

高い遠赤外線放射率を誇る、厳選の天然鉱石「温光石」を使用。  
じんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を、いつでもどこでも。

じんわり心地よい  
“あたためほぐし”のヒミツ

手軽に使えて身体にフィット! 効率良く温めます。

専門スタッフが施術を行う鍼灸整骨院やエステサロンから、セルフでサービスを提供する施設まで、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパック、HEATRAY「ウォームストーンパック」を、ぜひご活用ください。

厳選の天然鉱石  
「温光石」(弊社名)  
を使用



凝りやすい肩に

関節痛の  
出やすいヒザに

冷えやすいお腹に

負担のかかりやすい  
腰やふくらはぎに

大きな血管やリンパ節のある  
足の付け根に



ウォームストーン  
パック  
導入メリット

施設・個人ともに利用されています

持ち運びに便利!

コードレスタイプなので、場所やシーンを問わずカバンに、「〇〇しながら利用」が可能です。

体の芯まで  
温まります!

岩盤浴と同じく遠赤外線作用が働きますので、15~20分当てると体の深部まで温まります。

電子レンジ  
使用可能!

電子レンジが使用可能なので、急な施術にもスピーディに対応できます。

お洗濯も  
スムーズ!

袋が二重構造なので取り替え簡単。お洗濯もスムーズに行えます。

導入が手軽!

設置に特別な技術は必要ありませんので、手軽にご導入いただけます。

# 設置も、お手入れも簡単!どこでも使えるコードレスタイプ



HEATRAY「ウォームストーンパック」は、遠赤外線を放射する天然鉱石を体にフィットする大きさ・形状にして、専用の二重構造の耐熱袋に封入した岩盤浴ホットパックです。持ち運びに便利なコードレスタイプで、ウォーマーと併せて電子レンジによるあたためも可能。場所やシーンを問わず、カンタン・スピーディに温熱効果を味わえる、持ち運びのできる本格岩盤浴ホットパックです。

## おすすめ設置場所・施設

手軽に導入できてサービス力アップ!  
様々な施設で使用できます。

鍼灸  
整骨院



代々木整骨院様

デイ  
サービス



FlowSalon かんべ様

こちらの施設等でも利用可能です。  
導入事例の詳細は、下記ホームページにて随時アップしています。

エステサロン/フィットネスクラブ/ゴルフ場  
企業のリラクゼーション/リフレッシュルーム/一般家庭など

## HEATRAY「ウォームストーンパック」の特徴

### 体にしっかりフィットする、 コードレスタイプのホットパック。

持ち運びに便利なコードレスタイプの3つのサイズのホットパックをご用意。“寝ながらお腹を温める”“足浴をしながら凝った首や肩に当てる”など、シーンを問わずカンタンに「〇〇しながら利用」が可能です。いつでもどこでもじんわりポカポカ心地よい“あたためほぐし”を味わえます。



※個人のお役様のセルフ用途には首・肩用がおすすめです。

### 袋が二重構造で取り換えカンタン。 お洗濯もスムーズ。

袋は、天然鉱石の入った密封式の内袋と、ファスナー付きの外袋の二重構造になっています。

汚れたときなどのお洗濯もスムーズに行えますので、清潔さを保て、メンテナンスにかかる手間を軽減できます。



※外カバーのみお洗濯が可能です。

### 厳選された天然鉱石 「温光石」(弊社名)を使用。

天然鉱石には、遠赤外線の放射率がが高く、健康維持に有益なごく限られた波長帯の育成光線を優先的に放出する「温光石」(弊社名)を使用しています。

この天然鉱石が、HEATRAY「ウォームストーンパック」の“あたためほぐし”の肝で他とは一線を画する。“体を芯から温め、かつ冷めにくい”、“自然な心地よい温かさ”を生み出します。

岩盤浴鉱石各種 遠赤外線放射率比較データ	
測定: (財)日本薬学検査協会 ※6~20um平均積分放射率	遠赤外線積分放射率
天然鉱石(温光石)	93.0
天然鉱石 A	87.1
天然鉱石 B	89.2
天然鉱石 C	88.4



「温光石」は、濡れない足湯「お・も・て・な・し・あしゆ」でも使用している天然鉱石です。

### 電子レンジ使用可能。

電子レンジによるあたためが可能なので、急な施術が入った場合など、すぐに使いたいときに、スムーズかつスピーディに対応できます。

- 目安として、600W・2分程度(ワンポイント用は1分程度)で心地よい温度になります(季節や設置環境、電子レンジの機種により差異あり)。
- 冷めきっていない状態から追加で温める際には、短い時間(15~20秒程度)に設定して温めてください。
- 電子レンジのオート加熱機能でのあたためは、絶対に行わないようにしてください。



### 信頼と実績のある 国内メーカーのウォーマーをご用意。


国内の業務用厨房機器メーカーとして信頼と実績のあるタイジ社のウォーマー「ナースキャビ」を採用しています。マイコン制御で30℃~90℃で温度設定ができるので、季節や設置環境の温度に合わせたきめ細かい対応が可能です。内部はスライド式の3段タイプ。1段にお腹・腰用6個、首・肩用4個を収納できます。




※あたたため所要時間を短縮したい場合は、電子レンジの併用がおすすめです。

### 設置もカンタン。

設置作業に特別な技術は必要ありません。ウォーマーに「ウォームストーンパック」を収納して電源を入れ、温度設定を行うだけのカンタン作業で行えます。

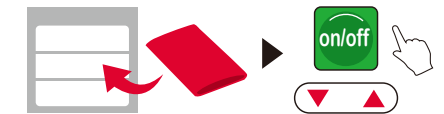

## ●製品ラインナップ 部位に合わせた3種の形状のホットパック、安心の国内メーカーのウォーマー(特別仕様)をご用意しています。

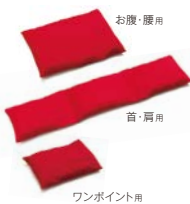

HEATRAY「ウォームストーンパック」 ※希望小売価格は税別です

製品名	型番	希望小売価格	サイズ(W×L/㎜)	天然鉱石重量
お腹・腰用	WSP-001	9,800円	約180×250mm	約1,076g
首・肩用	WSP-002	13,800円	約505×130mm	約1,350g
ワンポイント用	WSP-003	5,800円	約173×130mm	約450g

※洗い替え用の外カバーのみもご用意しています。

「HEATRAY「ウォームストーンパック」と、ウォーマー「ナースキャビ」のお得なセットもラインナップしています。詳細は下記公式ウェブサイトまで。

◆HEATRAY「ウォームストーンパック」は、インターネット上での販売は弊社直営のユメロン黒川ネットショップでのみ行ってまいります。



ナースキャビ

ウォーマー(タイジ社) ※希望小売価格は税別です

製品名	型番	希望小売価格	サイズ(外寸 W×L×H/㎜)	消費電力/本体重量
ナースキャビ	HC-38NA	140,000円	450×410×450mm	410W/13kg

※「ナースキャビ」の内部はスライド式の3段タイプ。1段にお腹・腰用6~8個(縦積み2列)、首・肩用4個を収納できます。※弊社が提供する「ナースキャビ」は特別仕様となります。(外付けON/OFFタイマーが利用可。たわみ防止用の専用アルミプレート2枚付き(非売品))



株式会社ユメロン黒川  
〒915-0822 福井県越前市元町5-7  
tel.0778-24-0500

ユメロン黒川については ⇒ <https://www.yumeron.com/>

ウォームストーン  
パック



『ウォームストーンパック』が気になる方へ。

最新情報・導入事例・FAQなど詳細は

<https://heatray-warmstone.com/>